



ACCES VASCULAIRE MOYEN ET LONG TERME
Système de sécurisation de cathéters percutanés



securAcath®



Value Life




Manipulation et Entretien

Le securAcath® facilite le changement du pansement parce que le dispositif maintient le cathéter sécurisé pendant que le site d'insertion est nettoyé et désinfecté.

Points importants :

- Si du sang est présent sur le dispositif, utiliser une compresse imbibée de solution saline pour nettoyer le sang avant de faire la désinfection.
- Soulever doucement le cathéter et le dispositif securAcath® pour nettoyer la zone autour du site d'insertion du cathéter.
- **Ne pas déformer ou tourner le dispositif securAcath® à partir de sa position d'origine lors du nettoyage du site d'insertion. Pas de rotation, pas de latéralisation. Déplacement du système de haut en bas et de bas en haut**
- Ne pas étirer le pansement lors de l'application pour éviter de causer une traction sur le dispositif securAcath®. Fixer le pansement sur le site d'insertion et le dispositif de stabilisation puis appuyer sur le reste du pansement, du centre vers l'extérieur. Un pansement étiré peut être inconfortable pour le patient et endommager la peau lors du retrait.
- Placer les ailettes de stabilisation du cathéter sous le pansement pour empêcher de tirer ou de plier le cathéter.
- **Si le patient se plaint de douleur au site d'insertion, changer le pansement. Assurez-vous que le securAcath® est à plat sur la peau et qu'il n'est pas déplacé par rapport à sa position initiale.** Ne pas étirer le nouveau pansement transparent au moment de recouvrir le site d'insertion.

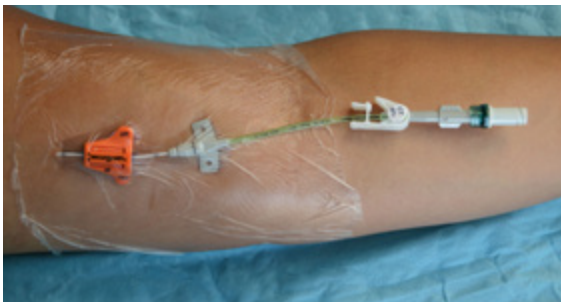


Possibilité de faire une boucle avec le cathéter en respectant l'alignement du securAcath®

Application mobile :
securAcath®

• Disponible sur l'App Store et Google Play

• Website
www.securacath.com

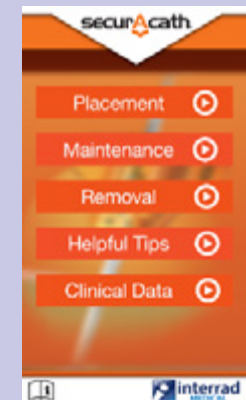

Bonnes pratiques


● Manipulation du securAcath® pendant le soin



1

Le securAcath® doit être soulevé à 90° (sans mouvements latéraux) à chaque changement de pansement, pour assurer un bon nettoyage de la zone. Laissez securAcath® dans sa position d'origine.

Attention de ne pas tordre ni faire pivoter le securAcath® lorsque vous soulevez le cathéter.

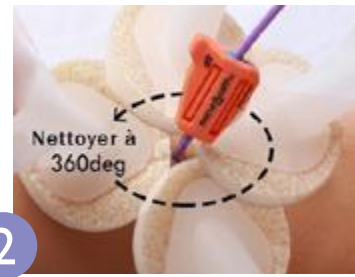

2

Désinfecter avec un antiseptique alcoolique, selon votre protocole local (avec une compresse ou un applicateur), tout autour du cathéter à 360 degrés.



3

Désinfecter correctement le site d'insertion. Le cathéter reste sécurisé pendant la manipulation.




4

Désinfecter le boîtier du securAcath® (avec une compresse ou un applicateur), dessus et dessous. Laisser sécher complètement à l'air avant d'appliquer le pansement.

Application mobile : securAcath®

- Disponible sur l'App Store et Google Play
- Site Internet www.securacath.com

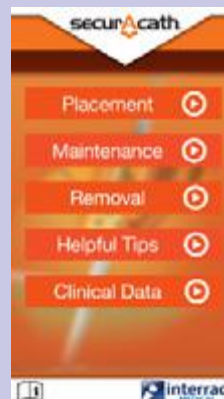

Le dispositif securAcath® est indiqué pour la fixation à court terme ou à long terme des cathéters à demeure percutanés au site d'accès à l'aide d'un dispositif d'ancrage sous-cutané. securAcath® est un médical de classe IIB stérile, fabriqué par INTERRAD MEDICAL INC. et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié AMTAC CERTIFICATION SERVICES LTD (CE0473). Lire attentivement la notice d'utilisation.

Interrad Medical et SecurAcath sont des marques déposées de Interrad Medical, Inc.

Fabricant :



Interrad Medical, Inc.
181 Cheshire Lane Suite 100
Plymouth, MN 55441
États-Unis
1-866-980-1811
www.securacath.com

Représentant autorisé :

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre, Allemagne
+49 511 6262 8630



Value Life



Retrait



- Saisir la languette HOLD sur le dispositif securAcath® entre le pouce et l'index d'une main pour stabiliser le dispositif.
- Tirer vers le haut le bord de l'onglet LIFT avec l'autre main pour libérer le couvercle de la base de l'ancrage.



- Retirer le couvercle entièrement de la base.



- Retirer le cathéter.
- Maintenir une pression sur le site d'insertion jusqu'à l'hémostase.
- Si le site d'insertion est recouvert d'une croûte ou de tissus fixant fermement le cathéter, imbiber une compresse de sérum physiologique et appliquer sur le site une minute. Ceci facilitera le retrait du dispositif.



- Utiliser des ciseaux à pointes émoussées pour couper la base en deux pièces, au centre.



- Les ancrages flexibles sont en forme de « L » avec une base de 5 mm de chaque côté du site d'insertion.
- Appliquer une pression ferme au site d'insertion avec un doigt juste au-dessus de l'ancrage.



- Les bases de l'ancrage forment un angle de 90 degrés avec la partie centrale. D'un mouvement rapide et délibéré, suivre l'angle de la base pour retirer les deux morceaux.
- Exercer une pression au site d'insertion avec un doigt. Ceci permet d'éviter le mouvement de la peau tout en permettant à l'ancrage d'être retiré.

Le dispositif securAcath® est indiqué pour la fixation à court terme ou à long terme des cathéters percutanés à l'aide d'un dispositif d'ancrage sous-cutané. securAcath® est un dispositif médical de classe IIB stérile, fabriqué par INTERRAD MEDICAL INC. et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié AMTAC CERTIFICATION SERVICES LTD (CE0473). Lire attentivement la notice d'utilisation.

Interrad Medical et SecurAcath sont des marques déposées de Interrad Medical, Inc.

Fabricant :



Interrad Medical, Inc.
181 Cheshire Lane Suite 100
Plymouth, MN 55441 - États-Unis
1-866-980-1811
www.securacath.com

Représentant autorisé :

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre, Allemagne
+49 511 6262 8630

